

滅菌済

# ステリ・バッグ

PAT.P

IVH・混注・輸血・各製剤の病棟払い出し在宅医療用に最適!

ローコスト版

SB-48NB

UV遮光/茶色

SB-48NC

UVカット/透明

中身が見える!

## 特長

- ①真空パック可能な袋です。従来品同様の強度が有り、開封するまで真空を保持します。(誤開封・汚染防止)
- ②酸素透過率、水蒸気透過率が低く、紫外線(UV)遮光のSB-48NBと紫外線(UV)カットの透明タイプのSB-48NCにより、薬液の品質劣化を防ぎます。(品質安定)
- ③10枚単位でパックし、更に滅菌(ガンマー線)済みで、クリーンルーム・クリーンベンチ内でそのまま使用できます。(汚染防止)
- ④使用時はフック取り出し口を開封し、フックを吊り下げることにより、そのまま紫外線(UV)遮光・防塵の点滴カ

バーとなります。(1パックで2役)

- ⑤開封は簡単なノッチ付で、直線に切ることができます。(簡単)

## 仕様

型式	寸法(mm)	包装単位
SB-48NB	480×300	10枚/1パック×50 =500枚/1箱
SB-48NC	480×300	

(注) 紫外線透過率は従来より、若干大きくなります。

## 使用方法

① ノッチ部を手で引き裂いて開封する

② 頭部分がたたら、フックにかけます。

③ 破線にそってカットする

④ ノズルを取り出して完了です。

フック側横破線をカットする

フックを取り出しスタンドにかける

下側破線をカットしノズルを取り出し使用する

上下両サイド(部4ヶ所)部に引き裂きやすいようにノッチ加工をしています。

フックが出ないときは縦破線をカットして取り出してください

## 卓上真空包装器 SQ-202



### 特長

- ①吸気もシールもボタンを押すだけのワンタッチ操作。
- ②-500mmHg強力吸引でヒートシール密閉。
- ③ステリ・バッグの真空シールに最適です。

### 仕様

型 式	SQ-202	
電 源	100V 50/60Hz	重 量 13kg
定格消費電力	500W	吸 気 時 間 連続 約2~10秒
吸 気 性 能	-500mmHg	シ ー ル 時 間 約1~4秒
接 着 部 温 度	160℃	シ ー ル 可 能 幅 300mm以下(SB-50は2回シール)
外 形 寸 法	410(幅)×260(長さ)×172(高さ)mm	機 能 吸気シール、シールのみ
温度過昇装置	サーモスタット	最大連続使用 吸気シール3回/分、シールのみ3回/分
電源コード長さ	2m	付 属 品 シールヒーター3本/分、テフロンテープ3枚

## 真空脱気シーラー V-300



### 特長

- ①真空ノズル手動出し入れ。
- ②強力シール。
- ③大量シール向です。

### 仕様

型 式	V-300	
電 源	100V 50/60Hz	
定格消費電力	1050/560W	
シール可能幅	10/5mm	
シ ー ル 長	300mm	
重 量	12kg	
外 形 寸 法	370(幅)×430(長さ)×270(高さ)mm	
プラグ形状	㊦	

## 真空脱気シーラー V-400



### 特長

- ①強力真空ポンプ  
80ℓ/min (5.33×10<sup>3</sup>pa)
- ②駆動用と真空吸気用を一体化したコンプレッサー内装。
- ③シール幅 400mm
- ④フットスイッチ付

### 仕様

型 式	V-400	
電 源	100V 50/60Hz	
定格消費電力	2000/1100W	
シール可能幅	10/5mm	
シ ー ル 長	400mm	
重 量	40kg	
外 形 寸 法	580(幅)×520(長さ)×340(高さ)mm	
プラグ形状	㊦	

## オートシーラー FA-200-10P



### 特長

- ①ラックンステリ・パウチ用に最適な特別アタッチメント付です。
- ②コンパクトな卓上型自動シール機でフットスイッチ付で、両手は自由に使えます。
- ③セレクトスイッチの切り替えて、自動連続運転も可能です。
- ④インパルス式なので、電源を入れたとすぐに使用できます。
- ⑤日付印字機が標準組み込まれています。

### 仕様

型 式	FA-200-10P	
電 源	100V 50/60Hz	
定格消費電力	1100W	
シール可能幅	10mm	
シ ー ル 長	200mm	
重 量	18kg	
外 形 寸 法	310(幅)×360(長さ)×420(高さ)mm	